


SELEKT®

Entretien, nettoyage et pièces de rechange



TOUTES LES
PIÈCES SONT
REMPLAÇABLES

Pièces de rechange et accessoires pour le Pulvérisateur à pompe SELEKT

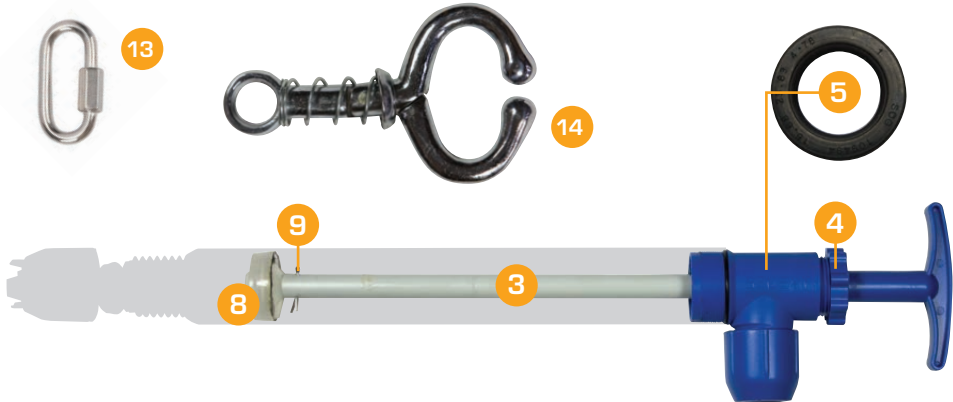

Pièces de rechange

- 1 Tuyau et emboutSHT01
- 2 Bouchon..... 203035
- 3 Poignée de la tige de pompe et goupille fendue 203041
- 4 Raccord de la tige de pompe . 203047
- 5 Rondelle de la tige de pompe . 203055
- 6 Pièce supérieure avec joint d'étanchéité 203046
- 7 Pièce inférieure avec joint d'étanchéité..... 203051
- 8 Rondelle revêtue de Téflon ... 203048
- 9 Goupille fendue..... 203049
- 10 Rondelle de tuyau 24 mm 203011
- 11 Raccord inférieur 203052
- 12 Raccord supérieur..... 203053
- 13 Mousqueton 203004
- 14 Pince à nez 203001

Accessoires

Seau et couvercle 22 litres SBLO1

Grand fouet.....SWK01



Entretien du bouchon

Pour maintenir le bouchon en bon état, utilisez du papier de verre pour le lisser s'il venait à être abîmé par les dents des vaches.

Nettoyage de la pompe

1. Lavez-la avec du savon ou un autre détergent pour éliminer les matières organiques.
2. Rincez à l'eau tiède.
3. Après le lavage, nous recommandons de désinfecter le Pulvérisateur à pompe à l'aide d'acide hypochloreux, qui n'a aucun effet corrosif sur l'équipement.
4. L'hypochlorite (eau de Javel) constitue une alternative, mais il est susceptible de provoquer une légère corrosion.
5. L'hypochlorite laitier, qui contient de l'hydroxyde de sodium, ne doit pas être utilisé car il peut endommager l'équipement.
6. Pour terminer le nettoyage, rincez à nouveau l'équipement à l'eau tiède.

Remarque :

Température maximale de l'eau : 50°C / 120°F

It is important to use at least 2% solution. It makes the pump work better and prevents corrosion.

Lubrification de la rondelle de la tige de pompe



Dévissez le raccord de la tige de pompe situé en haut de la pompe.



Vaporisez de la silicone sur la rondelle de la tige de pompe, puis revissez l'écrou.



Important that each sachet be made up in 20 litres of water. The 22-litre bucket is easy to do. The extra-large whisk is quick to mix the formulae and the lid is spillage.

Remplacement de la tige de pompe, de la rondelle de tige de pompe ou de la rondelle revêtue de Téflon



Étape 1

Dévissez la pièce supérieure.



Étape 2

Retirez la tige de pompe avec la pièce supérieure et la rondelle revêtue de Téflon.



Étape 3

Retirez la goupille fendue de la tige de pompe et remplacez la tige de pompe, la rondelle de tige de pompe ou la rondelle revêtue de Téflon. Pour remplacer la rondelle de la tige de pompe, dévissez d'abord le raccord de la tige de pompe.



Étape 4

Placez la rondelle revêtue de Téflon à l'extrémité de la tige de pompe et insérez une nouvelle goupille fendue.



Étape 5

Remontez la pompe.

N.B. Ne serrez pas trop la partie supérieure, car cela pourrait l'affaiblir.

Les équipements SELEKT et les préparations de nutrition clinique sont disponibles auprès de votre vétérinaire

Demandez plus d'informations à votre vétérinaire
ou contactez Nimrod Veterinary Products Ltd

Nimrod peut organiser des « Pump Clinics » pour la réparation et l'entretien des équipements SELEKT dans des cabinets vétérinaires à travers le Royaume-Uni. Pour toute assistance en dehors du Royaume-Uni, veuillez contacter votre distributeur.



Nimrod Veterinary Products Ltd

2 Wychwood Court, Moreton-in-Marsh
Gloucestershire, GL56 0JQ Royaume-Uni

T +44 1608 652593

www.selektsystem.co.uk

SELEKT® est une marque déposée de Nimrod Veterinary Products Limited
© 2025 Nimrod Veterinary Products Ltd. All rights reserved.