


SELEKT®

Onderhoud, reiniging & reserveonderdelen



ALLE
ONDERDELEN
VERVANGBAAR

Reserve-onderdelen & accessoires voor de SELEKT® doseerpomp

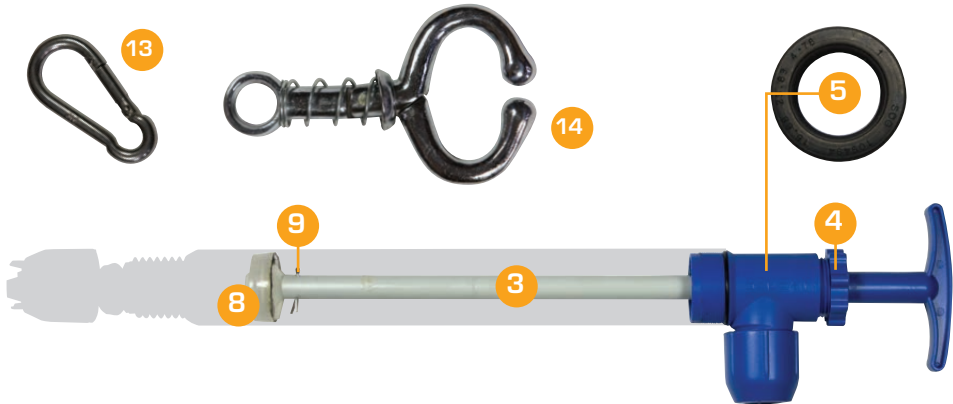

Reserveonderdelen

- 1 Slang & uiteinde.....SHT01
- 2 Mondstuk 203035
- 3 Pompstanggreep
& splitpen 203041
- 4 Pompstangkoppeling 203047
- 5 Pompstangring..... 203055
- 6 Bovenstuk met pakking..... 203046
- 7 Onderstuk met pakking..... 203051
- 8 Met teflon beklede ring 203048
- 9 Splitpen 203049
- 10 Slangring 24 mm..... 203011
- 11 Benedenkoppeling 203052
- 12 Bovenkoppeling 203053
- 13 Karabijnhaak..... 203004
- 14 Neusklem..... 203001

Accessoires

- Emmer & deksel 22 liter..... SBL01
- Grote garde.....SWK01

Onderhouden van het mondstuk

Om het mondstuk in goede staat te houden, kunt u schuurpapier gebruiken om deze glad te maken als deze ruw wordt door de tanden van de koeien.

De pomp reinigen

1. Was met zeep of een ander reinigingsmiddel om organisch materiaal te verwijderen.
2. Spoel met warm water.
3. Na het wassen raden wij aan de doseerpomp te desinfecteren met hypochloorzuur, wat geen corrosief effect op de apparatuur heeft.
4. Een alternatief is hypochloriet (bleekwater) maar dit kan een beetje corrosie veroorzaken.
5. Zuiver hypochloriet, dat natriumhydroxide bevat, mag niet worden gebruikt omdat het de apparatuur beschadigt.
6. Na het reinigen spoelt u de apparatuur opnieuw met warm water.

Opmerking

Max watertemperatuur 50°C / 120°F



Het is bel
bevat. De
te doen. M
snel meng

Smering van de pompstangring



Schroef de pompstangkoppeling aan de bovenkant van de pomp los.



Spuut siliconen op de pompstangring en schroef de moer weer terug.

angrijk dat elk zakje minimaal 20 liter water
emmer van 22 liter maakt dit eenvoudig om
Met de extra grote garde kunt u de formule
gen en het deksel voorkomt morsen.



Vervangen van de pompstang, pompstangring of met teflon beklede ring



Stap 1

Schroef het bovenste stuk los.



Stap 2

Verwijder de pompstang met bovenstuk en met teflon beklede ring.



Stap 3

Verwijder de splitpen van de pompstang en vervang de pompstang, pompstangring of met teflon beklede ring. Voor het vervangen van de pompstangring eerst de pompstangkoppeling losschroeven.



Stap 4

Monteer de met teflon beklede ring en plaats een nieuwe splitpen.



Stap 5

Monteer de pomp weer.
Draai het bovenstuk niet te strak aan, dit kan leiden tot verzwakking.

SELEKT®-materialen en drench- producten zijn verkrijgbaar bij uw dierenarts

Vraag uw dierenarts om meer informatie of neem contact
op met Nimrod Nederland BV



Nimrod Nederland B.V.
Doetinchemseweg 59
7007 CB Doetinchem
Nederland

T +31 (0)314 848809
E nimrod@nimrodvet.eu
www.nimrodvet.eu
www.selektsystem.co.uk



GMP+ FSA Assured

SELEKT® is een geregistreerd handelsmerk van Nimrod Veterinary Products Ltd
© 2025 Nimrod Veterinary Products Ltd. All rights reserved.